

# INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE DE K3, K4, K4-XTEND™ CPM DE LA RODILLA

## Para cambiar Extensión y Flexión:

1. Oprime la tecla **ALTO**.
2. Oprime las teclas de **Extensión** y **ALTO** al mismo tiempo hasta que la pantalla tenga >>> señalando al valor de extensión.
3. Para cambiar la extensión, oprime la tecla **Extensión**.
4. Oprime la tecla de mas (+) ó menos (-) para subirle ó bajarle.
5. Para cambiar la flexión, oprime la tecla **Flexión**.
6. Oprime la tecla de mas (+) ó menos (-) para subirle ó bajarle.
7. Para guardar los valores oprime la tecla **ALTO**.
8. Oprime la tecla de **COMIENZÓ**.

