

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE DE KS2™ CPM DEL HOMBRO

Para cambiar abducción y rotación externo:

1. Oprime la tecla **ALTO**.
2. Para cambiar abducción, oprime la tecla **MENU** una vez; el símbolo **M1** debe parecer en la pantalla.
3. Oprime la tecla **Abducción** en el izquierdo superior del controlador de mano.
4. Oprime la tecla más (+) ó menos (-) para subirle ó bajarle.
5. Para cambiar la rotación de externo, oprime la tecla **Rotación Externo** en el derecho superior del controlador de mano.
6. Oprime la tecla más (+) ó menos (-) para subirle ó bajarle.
7. Oprime la tecla de **COMIENZÓ** para guardar.
8. Oprime la tecla de **COMIENZÓ** para empezar terapia.

